

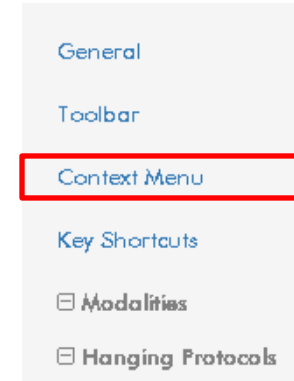


1. Acesse o manual *DGB - Como acessar a barra de ferramentas do visualizador* para saber como localizar o menu de opções para personalizar o Visualizador Dicom Grid;
2. Para personalizar o menu de contexto do visualizador, selecione a opção “Context Menu”, localizada no canto esquerdo da tela.

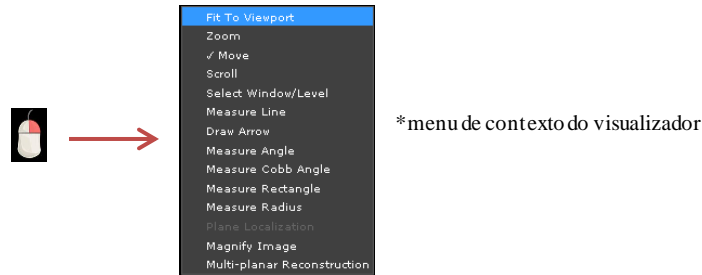

3. Na customização dos botões do menu de contexto você poderá escolher entre as opções abaixo:

### Context Menu

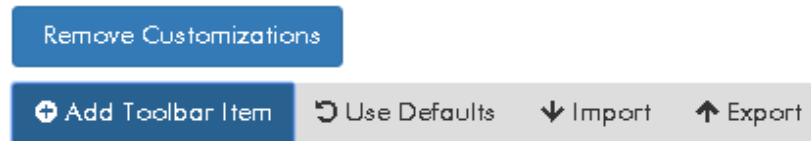

- “**Add Toolbar Item**”: Cria uma nova funcionalidade, que será apresentada como uma opção dentro da listagem do menu de contexto.

- As opções abaixo estão relacionadas com modelos pré-definidos:

- “**Remove Customizations**”: Remove apenas a visualização dos botões, sem alterar o padrão do menu de contexto já existente.
- “**Use Defaults**”: Deleta todas as alterações anteriormente realizadas, e configura o menu de contexto para trabalhar no modo padrão.
- “**Import/Export**”: É possível utilizar um modelo de menu de contexto desenvolvido por outro usuário, ou disponibilizar a sua própria configuração para que outros usuários utilizem.

4. Após qualquer alteração desejada, salve o novo modelo, clicando no botão “Save”.
5. Feche o Visualizador Dicom Grid e abra novamente para que as alterações tenham efeito.

